


LUCAS™ 2 Краткое руководство

Система непрямого массажа сердца

Примечание. Данное руководство не является полной инструкцией по применению. Обращайтесь к «Инструкциям по применению», где приводятся полные указания по использованию, данные об индикаторах, противопоказания, предупреждения, меры предосторожности и возможные нежелательные последствия.

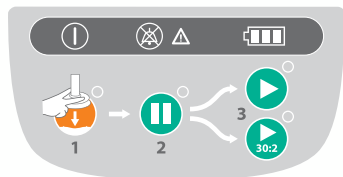

ON/OFF
(Вкл/Выкл)



ADJUST
(Регулировка)



PAUSE (Пауза)



ACTIVE (continuous)
(Рабочий режим
непрерывный)




ACTIVE (30:2)
(Рабочий режим (30:2))

После подтверждения остановки сердца у пациента начинайте ручную сердечно-легочную реанимацию (СЛР) с минимальными прерываниями до тех пор, пока устройство LUCAS не будет установлено и готово к работе.




1 Активация (А)

- Нажмите и удерживайте клавишу **ON/OFF** (ВКЛ/ВЫКЛ) в течение 1 секунды, чтобы запустить самодиагностику и включить питание устройства LUCAS

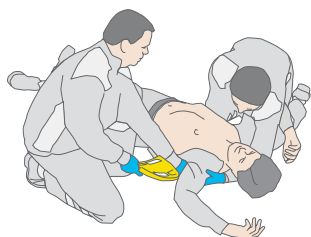


2 Опорная пластина (В)

- Сделайте паузу в ручной СЛР
- Аккуратно подложите опорную пластину под пациента, в области подмышечных впадин
- Возобновите ручную СЛР

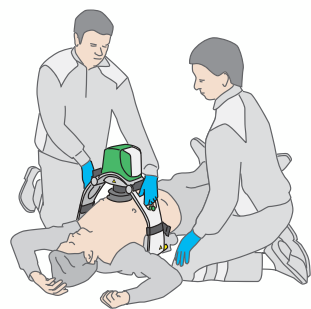

3 Устройство для компрессионных сжатий (С)

- Потяните размыкающие кольца; фиксаторы зажима опоры откроются. Отпустите размыкающие кольца
- Присоедините устройство к опорной пластине; должен прозвучать щелчок
- Потяните за устройство, чтобы убедиться в надежности крепления

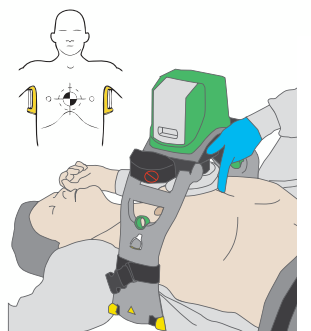


4 Установка положения вакуумной присоски

- Расположите вакуумную присоску над центром груди
- Нижний край вакуумной присоски должен располагаться непосредственно над концом грудины


5 Прижатие вакуумной присоски

- Опустите вакуумную присоску двумя пальцами (убедитесь, что устройство находится в режиме **ADJUST** (Регулировка))
- Массажная подушка внутри вакуумной присоски должна коснуться груди пациента. Если подушка не касается груди или не прилегает должным образом, продолжайте непрямым массаж сердца вручную
- Нажмите клавишу **PAUSE** (ПАУЗА), чтобы зафиксировать начальное положение, после чего снимите пальцы с вакуумной присоски

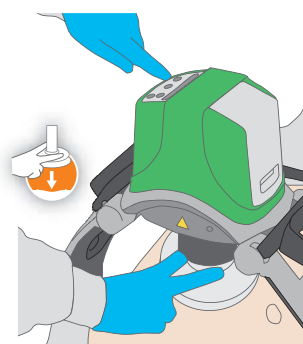


6 Запустите непрямой массаж сердца

- Проверьте правильность положения. При необходимости отрегулируйте его
- Нажмите клавишу **ACTIVE (continuous)** (Рабочий режим непрерывный) или **ACTIVE (30:2)** (Рабочий режим (30:2))
- Устройство LUCAS будет производить массаж со скоростью 100 сжатий в минуту и с амплитудой 4-5 см.

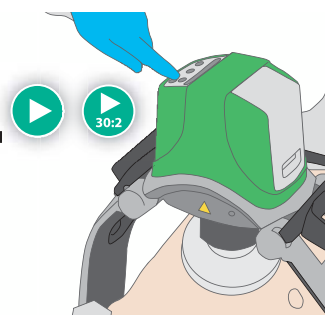

7 Стабилизирующий ремень LUCAS

- Зафиксируйте стабилизирующий ремень LUCAS

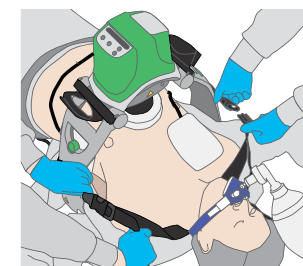

При использовании системы LUCAS всегда соблюдайте местные и/или международные рекомендации по сердечно-легочной реанимации.